



使用注意事項

重要提示：使用『太賀磁波機』前，請詳讀使用說明書，確認您不在「禁用」範圍內、並嚴格按照使用順序操作。

鑒於儀器在使用過程中、會使血液循環增加，有以下情況之人群禁止使用及注意事項。

- ❗ 高熱、出血症狀及出血傾向者，手術後未超過半年者。
- ❗ 月經期女性、嬰幼兒、癲癇及精神病患者。
- ❗ 體內植入心臟起搏器、支架及人工耳聾等電子設備者，體內植入鋼板、骨關節支架等金屬物件者。
- ❗ 心梗、腦梗患者、腦溢血及中風患者，痊癒未滿半年者的病人。
- ❗ 孕婦、哺乳期一年內、嚴重的心肺功能不全人群、體質虛弱及重病人士。
- ❗ 血壓嚴重異常者、皮膚嚴重過敏人群、傳染病患者。
- ❗ 未滿 18 周歲人群禁用、如 60 歲以上人群需有人陪同。
- ❗ 使用時、請記得補充 300cc 以上溫開水，上環者可以使用。
- ❗ 使用時間；建議每次 30 分鐘，兩次間隔時間 4 小時以上。
- ❗ 使用過程中；請根據個別自身的身體狀況與接受程度、自行調整強度。建議由低至高的使用原則調節強度。

特別提示：本儀器不得替代藥物與治療